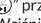
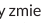

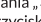
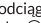
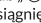
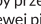
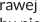



Proste instrukcje działania laktatora 07

Przytrzymaj „” przez 1,5 sekundy, by włączyć laktator (automatycznie włącza się tryb masażu). Wciśnij przycisk jeszcze raz, by zatrzymać odciąganie. Wciśnij „”, by zmienić tryb (masażu/odciągania/imitacji ssania) Tryb masażu „” (łącznie 10 poziomów) Tryb odciągania „” (łącznie 10 poziomów) Tryb imitacji ssania „” (łącznie 10 poziomów) Przytrzymaj przycisk zmiany trybu „”, by włączyć tryb naprzemienny (tryb masażu i odciągania, tryb masażu i imitacji ssania) Naciśnij „” lub „”, by dopasować moc ssania. Jeśli liczba miga nieprzerwanie, to znaczy, że osiągnięto najwyższy lub najniższy poziom. Naciśnij „”, by przełączyć między odciąganiem jedno- i dwustronnym Odciąganie z lewej piersi: wyświetla się litera „L” Odciąganie z prawej piersi: wyświetla się litera „R” Odciąganie z obu piersi: wyświetlają się litery „L” i „R”

- ▲ Domyślny czas działania laktatora to 30 minut. Następnie urządzenie automatycznie wyłączy się (przed wyłączeniem zapamięta poziom trybu odciągania).
- ▲ Mleko w butelce nie powinno sięgać zaworu, aby się nie wylało.

Korzystanie z laktatora

- Dokładnie umyj ręce i upewnij się, że Twoje piersi są czyste. Usiądź w zrelaksowanej pozycji na wygodnym krześle lub fotelu (możesz użyć poduszek, by podeprzeć plecy). Upewnij się, że masz pod ręką szklankę wody.
 - Przyłóż laktator do piersi. Upewnij się, że Twoje brodawki są na środku poduszek masujących, które szczelnie do nich przylegają.
 - Wciśnij przycisk zasilania. Laktator automatycznie uruchomi tryb masażu – możesz regulować moc masażu za pomocą przycisków + i –.
- Gdy mleko płynie, możesz zmieniać tryby za pomocą przycisku, by wybrać ten najbardziej dla Ciebie komfortowy.
- Uwaga: Nie musisz wybierać najwyższego poziomu. Wybierz ten, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny.
- Gdy skończysz odciąganie pokarmu, wyłącz laktator i ostrożnie zdejmij go z piersi.
 - Odkręć butelkę od laktatora – możesz już karmić nią dziecko lub schować ją na później. Wyczyść pozostałe części laktatora, zgodnie z instrukcją w sekcji 10 „Czyszczenie i dezynfekcja”.
 - Odłącz silnik od prądu.

Czyszczenie i dezynfekcja 08

1.1 Przed pierwszym użyciem
Zanim zaczniesz korzystać z laktatora, wyczyść i zdezynfekuj wszystkie części z wyjątkiem silnika. Włącz urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w punktach 1.2 i 1.3.

- ▲ **Uwaga:**
 - Korzystaj jedynie z wody pitnej z kranu lub z butelki.
 - Zdemontuj laktator i umyj wszystkie części, które mają kontakt z piersią i mlekiem, od razu po użyciu, aby uniknąć zaszcznienia resztek mleka i zapobiec rozwojowi bakterii.

1.2 Po każdym użyciu
Umyj wszystkie części, które mają kontakt z piersią i mlekiem. Nie myj silnika. Zdemontuj laktator na części. Oplucz wszystkie części, które miały kontakt z piersią i mlekiem, w zimnej wodzie, by usunąć resztki mleka.

- Potrzebne akcesoria:**
- Łagodny płyn do mycia naczyń
 - Czysty zlew lub miska
 - Czysta ściereczka lub szcotka o miękkim włosiu
 - Woda pitna

- Mycie w zlewie:**
- Namocz wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem przez 5 minut.
 - Wyczyść je czystą ściereczką lub szcawką o miękkim włosiu.
 - Oplucz wszystkie części pojedynczo czystą wodą.
 - Odlóż wszystkie części do wyschnięcia w czystym miejscu.
 - Schowaj wszystkie części, gdy będą suche.

- Uwaga:**
- Umyj laktator po każdym użyciu.
 - Raz dziennie dezynfekuj wszystkie części.
 - Laktator nie wymaga serwisowania.
 - Uważaj, by nie uszkodzić żadnej części podczas mycia.
 - Jeśli myjesz części w zmywarce, mogą się one odbarwić przez barwniki spożywcze. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.
 - Przechowuj laktator w czystej torebce lub pojemniku, aż do kolejnego użycia.

- 1.3 Codzienna dezynfekcja**
- Dokładnie umyj ręce.
 - Zbierz wszystkie części, które mają kontakt z piersią i mlekiem.
 - Napelnij garnek wodą tak, by mogła pokryć wszystkie części.
 - Zagotuj wodę.
 - Włóż części laktatora do gotującej się wody na 10 minut.
 - Poczekaj, aż woda wystygnie, a następnie delikatnie wyjmij wszystkie części z wody za pomocą szczypec.
 - Wylóż wszystkie części na czystej powierzchni lub ściereczce.
 - Schowaj wszystkie części, gdy będą suche. Nie chowaj części, gdy są mokre lub wilgotne.

Dane techniczne 09

- Prąd wejściowy: 100-240 V – 50/60 Hz
- Prąd wyjściowy: 5 V = 1000 mA
- Napięcie nominalne: 5 V
- Moc znamionowa: 5 W
- Bateria litowa: 3.7 V 2600 mAh
- Żywotność urządzenia: 1,5 roku
- Domyślny czas działania: 30 minut
- Moc ssania: 60 mmHg – 280 mmHg
- Poziom hałasu: <50 dB
- Kod IP: IP22
- Odpowiednie warunki otoczenia do korzystania: 10–30°C, RH 15%–93%, 700–1060 hPa
- Odpowiednie warunki otoczenia do przechowywania: -25–50°C, RH 15%–93%, 700–1060 hPa
- Standard wykonawczy: GB4706.1-2005

Recycling

Baterie zawierają substancje, które mogą zanieczyścić środowisko. Nie wyrzucaj ich do zwykłego kosza na śmieci – oddawaj je do oficjalnego punktu zbiórki. Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki temu, że wyrzucasz urządzenie w odpowiedni sposób, zapobiegasz powstaniu zagrożenia dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Przeciwwskazania: brak

▲ **Uwaga:**

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę. Korzystanie z urządzenia przez więcej osób może stanowić zagrożenie dla zdrowia i unieważnić gwarancję.
- Jeśli zewnętrzne części zasilacza są poluzowane lub odpadają, przerwij korzystanie z urządzenia i natychmiast skontaktuj się z producentem. Uszkodzenie izolacji zewnętrznej przewodu może doprowadzić do porażenia prądem.
- Jeśli odciąganie pokarmu jest niekomfortowe lub bolesne, wyłącz urządzenie, rozdziel palcem pierś i nakładkę i zdejmij nakładkę.
- Odciąganie pokarmu może wywołać poród. Nie korzystaj z urządzenia przed porodem. Jeśli podczas karmienia piersią lub odciągania pokarmu zajdziesz w ciążę, skontaktuj się z lekarzem, zanim zaczniesz ponownie korzystać z laktatora.

- Jeśli jesteś zakażona wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C albo wirusem HIV, odciąganie pokarmu za pomocą laktatora nie ograniczy ani nie wyeliminuje ryzyka przekazania wirusa dziecku poprzez mleko.
- Nie podgrzewaj mleka w kuchence mikrofalowej ani go nie gotuj. Jeśli podgrzewasz mleko w kuchence mikrofalowej, mogą się w nim wytworzyć szczególnie gorące cząstki, które spowodują poważne poparzenia na ustach dziecka. (Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej może także zmienić skład mleka).

Środki ostrożności:

- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu zaraz po użyciu, o ile go nie ładujesz.
- Nie wkładaj urządzenia do miejsca, z którego może wypaść lub wpaść do umywalki lub zlewu.
- Laktator i akcesoria do niego nie są odporne na ciepło – zawsze przechowuj je z daleka od ciepłych powierzchni i ognia.
- Nie korzystaj z laktatora w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Nigdy nie należy zostawiać podłączonego do prądu laktatora bez nadzoru.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia elektrycznego, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie niewłaściwie działa lub zostało upuszczone lub uszkodzone. Jeśli zauważysz, że urządzenie jest uszkodzone, natychmiast przestań z niego korzystać i skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem +48 508 311 775.
- Nie korzystaj z urządzenia elektrycznego, które było wystawione na działanie wody lub innej cieczy, w tym:
 - Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem.
 - Nigdy nie wkładaj urządzenia do wody lub innej cieczy.
 - Nie polewaj laktatora wodą.
 - Jeśli urządzenie było narażone na działanie wody lub innej cieczy, nie dotykaj go. Odłącz je od prądu, wyłącz i skontaktuj się z producentem.
- Takie urządzenie nie nadaje się do naprawy. Nie naprawiaj go sama. Nie modyfikuj urządzenia.
- Nigdy nie korzystaj z uszkodzonego uszkodzenia. Wymień uszkodzone lub zużyte części.
- Korzystaj tylko z zasilacza załączonego do laktatora.
- Wykorzystuj laktator wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji.
- Nie korzystaj z laktatora, gdy śpisz lub jesteś bardzo śpiąca.
- Przez każdym użyciem sprawdź wszystkie części, z których będziesz korzystać.
- Jeśli w rurce pojawi się pleśń, przerwij korzystanie z laktatora i wymień ją na nową.
- Przed pierwszym użyciem umyj i zdezynfekuj wszystkie części, które mają kontakt z piersią i mlekiem.
- Po każdym użyciu myj wszystkie części, które mają kontakt z piersią i mlekiem.
- Musisz zachować szczególną ostrożność, gdy korzystasz z laktatora lub akcesoriów do niego w pobliżu dziecka.

Dziękujemy za wybór produktów InnoGIO!

Aby właściwie korzystać z produktu, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na wypadek, gdybyś miała jakiegokolwiek pytania w przyszłości.

Rysunki zawarte w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Jeśli występują jakiegokolwiek rozbieżności między rysunkami a produktem, prosimy stosować się do rzeczywistego produktu.







W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, prosimy o kontakt mailowy: innogio@innogio.com

Importer: INNOGIO sp. z o.o.

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

www.innogio.com

 @innogio.official  @innogio_com

GIO-350PRO

innogio



innogio

GIO momPRO

Podwójny laktator elektryczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja instrukcji: V1.0.

Data wydania: 2023/06

Wprowadzenie 01


Dziękujemy za zakup naszego produktu. Twój nowy laktator jest kompaktowy i dyskretny – możesz zabierać go ze sobą, gdziekolwiek chcesz, by wygodnie odciągać pokarm i podtrzymać produkcję mleka. Niniejsza instrukcja przedstawia różnego rodzaju środki ostrożności i sposób korzystania z podwójnego laktatora elektrycznego. Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość, przechowując w dogodnym miejscu.

Ten laktator został specjalnie zaprojektowany tak, abyś mogła odciągać pokarm w bardziej komfortowej pozycji. Delikatna podkładka ochronna masażera zapewnia uczucie miękkości i ciepła oraz symuluje ssanie piersi przez dziecko, dzięki czemu mleko płynie cicho, wygodnie, delikatnie i szybko. Laktator jest kompaktowy, inteligentny oraz łatwy w montażu. Wszystkie części wyprodukowano z materiałów wolnych od BPA; można je myć w zmywarce.

Ten laktator może pomóc Ci wydużyć okres karmienia piersią. Dzięki niemu możesz odciągnąć i przechowywać pokarm. Gdy nie możesz nakarmić dziecka piersią, małych może pić mleko odciągnięte przez laktator. Dzięki niewielkiej, przemysłanej budowie laktator jest bardzo wygodny w użyciu. Możesz go nosić ze sobą i odciągać mleko w odpowiednim dla Ciebie czasie, zapewniając pokarm swojemu dziecku.

Schemat urządzenia


Poniższa ilustracja wyjaśnia symbole ukazujące się na wyświetlaczu:

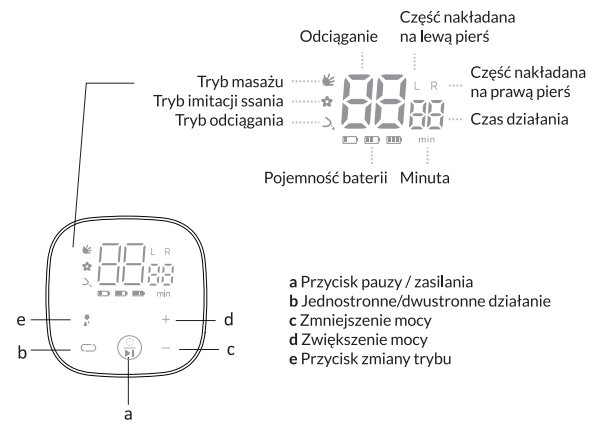

Opis części 02

1. Poduszcзка masująca*
2. Nakładka*
3. Obudowa laktatora*
4. Silikonowa membrana*
5. Pokrywka membrany*
6. Rurka
7. Zawór*
8. Butelka do karmienia*
9. Nakrętka do butelki z dzióbkiem*
10. Kabel USB
11. Silnik

Uwaga: Zestaw zawiera po 2 części oznaczone gwiazdką.

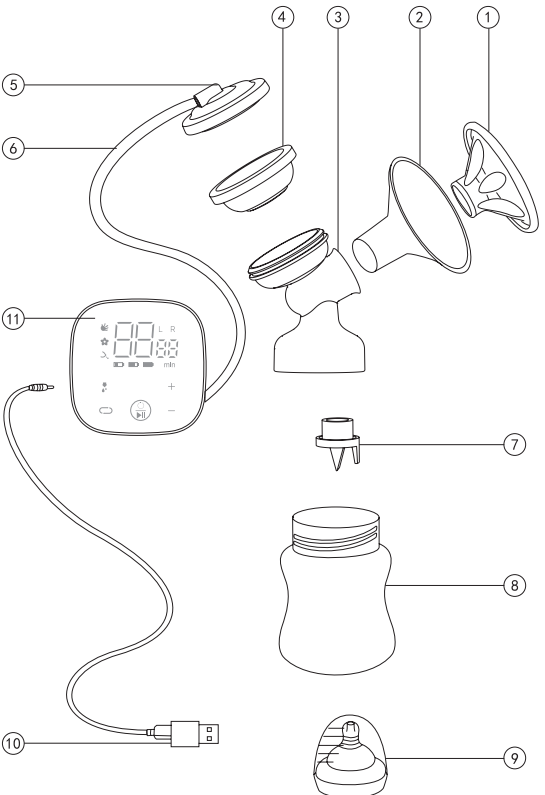




Przygotowanie do użycia i montaż 03

Wszystkie części należy umyć po każdym użyciu i zdezynfekować przed każdym użyciem, jak opisano w sekcji 10 „Czyszczenie i dezynfekcja”.


Montaż laktatora

Uwaga: Najpierw upewnij się, że umyłaś i zdezynfekowałaś wszystkie części (poza silnikiem). Dokładnie umyj ręce, zanim przystąpisz do montażu czystych części. Zachowaj ostrożność! Umyte części mogą nadal być gorące.

Zapoznaj się z poniższym schematem:

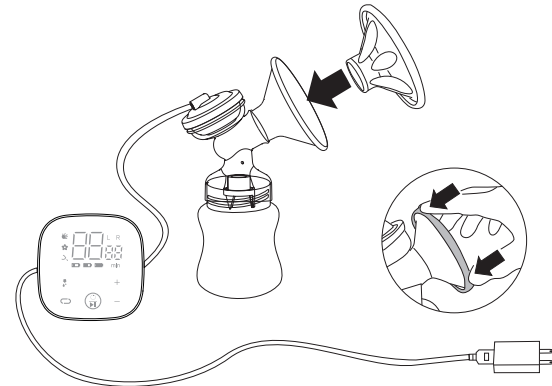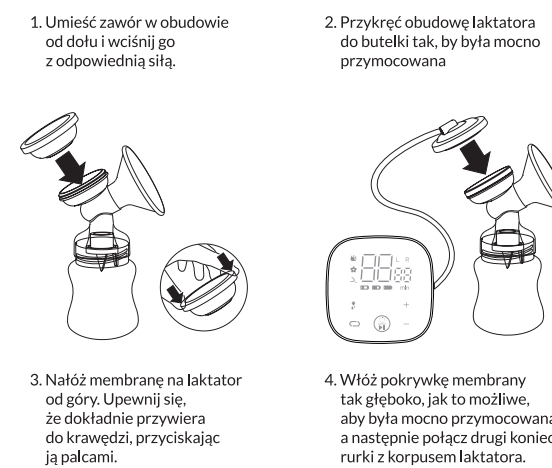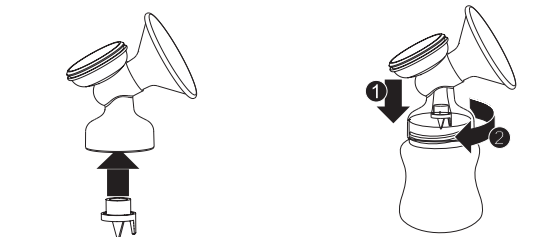


6. Jeśli chcesz odciągać pokarm z jednej piersi, włóż 1 rurkę do otworu w części głównej. (Drugi otwór może być zakryty).

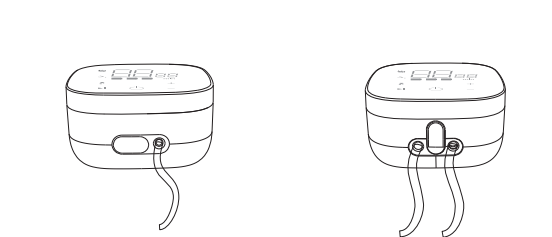

Uwaga: Jeśli Twój model laktatora to BB-5020, podłącz silnik do korpusu.

Korzystanie z baterii 05

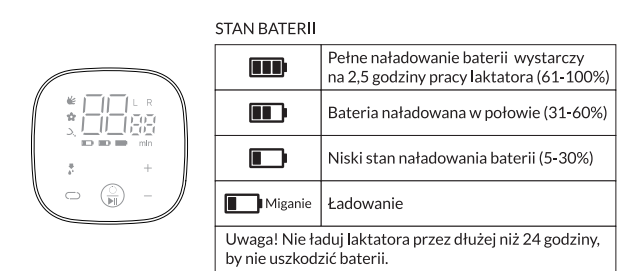

Rozwiązywanie problemów

- Brak ssania**
Sprawdź, czy wszystkie części zostały prawidłowo zmontowane oraz czy zawór nie jest uszkodzony (Uwaga: nigdy nie szoruj go podczas mycia). Upewnij się, że membrana i poduszcзка masująca dokładnie przylegają do obudowy laktatora.
- Nie mogę odciągnąć mleka**
Upewnij się, że moc ssania jest wystarczająca, a laktator został prawidłowo zmontowany. Zrelaksuj się i spróbuj ponownie, po kilku próbach uda Ci się odciągnąć mleko. Zwracaj uwagę na oznaki prawidłowego ssania.
- Ból w trakcie korzystania z laktatora**
Możliwe, że moc ssania jest zbyt duża. Nie musisz używać największej dostępnej mocy. Włącz tryb masażu, by pobudzić piersi, a następnie przełącz na tryb odciągania. Możesz także skontaktować się z lekarzem lub doradcą laktacyjnym.
- Problem z włączeniem**
Sprawdź, czy kabel podłączono do źródła zasilania o mocy 5V i natężeniu 1A, podłącz laktator do kabla USB komputera lub sprawdź działanie oryginalnej kostki zasilacza na swoim telefonie. Jeśli urządzenie jest rozładowane, naładuj je przed użyciem.
- Mleko się wylewa**
Jeśli zdarzy się wypadek, na przykład dostrzeżesz mleko lub wodę na membranie lub w rurce, wyłącz urządzenie, umyj je i odstaw do wysuszenia. Jeśli membrana jest uszkodzona, należy ją wymienić.

Korzystanie z laktatora 06

Kiedy odciągać pokarm

O ile lekarz lub doradca laktacyjny nie zaleci Ci inaczej, należy zacząć korzystać z laktatora, gdy ilość pokarmu i harmonogram karmienia będą stałe (zwykle 2–4 tygodnie po porodzie).

Wyjątki:

1. Odciągasz pokarm, który ma być podany dziecku w szpitalu.
2. Masz obrzęk piersi (ból Cię, są nabrzmięta): w takim wypadku możesz odciągnąć niewielkie ilości mleka przed karmieniem lub po nim, by złagodzić ból i pomóc dziecku w ssaniu.
3. Twoje brodawki są obolałe lub popękane: możesz poczekać z odciąganiem pokarmu, aż się zagoją.
4. Jeśli nie masz kontaktu z dzieckiem i chcesz karmić je piersią, gdy znów będziecie razem, powinnaś regularnie odciągać mleko, by laktacja nie ustała.

Jak skutecznie odciągać pokarm

Wybierz odpowiednią porę dnia, np. rano, gdy masz dużo pokarmu, przed pierwszym odciąganiem lub po nim. Odciągaj mleko, jeśli dziecko nie pije go bezpośrednio. Pracujące matki mogą odciągać pokarm, gdy odpoczywają w godzinach pracy. Korzystanie z laktatora wymaga praktyki – być może będziesz musiała spróbować kilka razy, zanim Ci się uda. Na szczęście laktator jest łatwy w montażu i obsłudze, dzięki czemu szybko się nauczysz, jak zręcznie odciągać pokarm.

Warto się zaznajomić z laktatorem i poznać sposób obsługi, zanim zaczniesz odciągać mleko po raz pierwszy. Wybierz czas, kiedy nie będziesz musiała się spieszyć i nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Zdjęcie dziecka może pomóc wywołać odruch wypływu pokarmu. Pomoc może także ciepło. Spróbuj odciągać pokarm po kąpielii lub przysnuć albo położyć na kilka minut na piersi ogrzaną chustę zanim zaczniesz odciągać mleko. Być może łatwiej będzie Ci odciągać pokarm, gdy dziecko będzie ssało drugą pierś lub tuż po karmieniu.

Przerwij odciąganie, jeżeli powoduje to ból i skontaktuj się z doradcą laktacyjnym lub lekarzem.